

# 1102 血管內皮代謝評估採檢須知

## Endothelial-META<sup>®</sup>

### 請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管標籤紙”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

### 檢體

紫頭 8ml x 1 支(血漿) **或** 白頭 5ml x 1 支(含凝膠之 EDTA 血漿)，冷藏

### 採檢注意事項

1. 空腹 8 小時以上抽血，可喝開水但勿超過 250ml。
2. 血液請置於 **4°C 冷藏** 保存。
3. **若使用白頭管採檢，請診所或健檢中心配備離心機，於採檢完後進行檢體離心動作。**
4. 若有服用藥物或營養輔助品，如阿斯匹林與降膽固醇藥物，須告知醫師或健康照護者作為報告判讀時的依據。

### 血液採檢法

- 1 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
- 2 檢體處理：
  - **紫頭：**  
抽取 1 支 EDTA 管(紫頭)，檢體採集後輕輕上下翻轉 10 次，待血液與抗凝劑混合均勻後 4°C 冷藏保存。
  - **白頭：**  
若檢體無法在短時間內送抵實驗室，請改用白頭管(含凝膠之 EDTA 管)採檢。抽取 1 支白頭管，檢體採集後輕輕上下翻轉 10 次，待血液與抗凝劑混合均勻後離心，將血球與血漿於凝膠中分離，避免因檢體放置過久溶血而影響到檢驗數據。離心後的白頭管無需另行分裝，置於 4°C 冷藏保存即可。
- 3 檢體請儘速送回實驗室。

### 報告天數

7 天