

1163 低密度脂蛋白亞型分析採檢須知

LDL Subfraction

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管標籤紙”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

紅頭 8ml x 1 支(血清)，冷藏

採檢注意事項

1. 空腹 8 小時以上抽血，可喝開水但勿超過 250ml。
2. 高油脂食物可能影響檢測結果，採檢前一日勿食用高油脂、或燒烤類食物。
3. 血液請置於 **4℃冷藏**保存。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，1 支生化採血管(紅頭)。
3. 1 支生化採血管(紅頭)於室溫下放置 30 分鐘，待完全凝固後 **4℃冷藏**保存。
4. LDL particle 的型態較不穩定，可能因檢體放置過久而裂解影響到檢測數據。檢體請於採檢後 3 日內送至實驗室。

報告天數

10 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有