

1285 脂蛋白代謝評估採檢須知

Lipoprotein-META[®]

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管標籤紙”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

紅頭 8ml x 1 支(血清)，冷藏

紫頭 3ml x 1 支(血漿)，冷藏

採檢注意事項

1. 空腹 8-10 小時以上抽血，可喝開水但勿超過 250ml。
2. 若有服用藥物或營養輔助品，包括阿斯匹林與降膽固醇藥物，須告知醫師或健康照護者。
3. 血液請置於 **4℃冷藏** 保存。
4. SdLDL、oxLDL、MPO 項目之檢體不易保存，採檢完後請儘速送回實驗室。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，1 支生化採血管(紅頭)、1 支 EDTA 採血管(紫頭)。
3. 1 支生化採血管(紅頭)於室溫下放置 30 分鐘，待完全凝固後 4℃冷藏保存。
4. 1 支 EDTA 採血管(紫頭)檢體採集後，輕輕上下翻轉 10 次，待血液與抗凝劑混合均勻後置於冰箱冷藏保存。
5. 檢體儘速送回實驗室。

報告天數

10 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有