

0845 胺基酸分析採檢須知

Amino Acid-META[®]

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

綠頭 3ml x 1 支(血漿)，冷藏

採檢注意事項

1. 空腹 8 小時以上抽血，可喝開水但勿超過 250ml。
2. 血液置於 4℃**冷藏保存**。
3. 胺基酸項目極易降解，檢體請儘速送回實驗室。
4. 避免於採檢前食用含阿斯巴甜(Aspartame)食品 and 飲料。
5. 避免於急性感染或抗生素治療期間採檢。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，1 支 Heparin 採血管(綠頭)。
3. Heparin 採血管(綠頭)檢體採集後，輕輕上下翻轉 10 次，待血液與抗凝劑混合均勻後 4℃ 冷藏保存。
4. 檢體儘速送回實驗室。

報告天數

14 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有