

0942 黃斑部退化基因分析採檢須知

Macular Genomics®

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

紫頭 4mlx1 支(全血), 冷藏

採檢注意事項

1. 血液檢體請置於 **4℃冷藏保存**，不可冷凍。
2. 檢體儘速送回實驗室。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期及出生年月日。採血管填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，抽取一支 EDTA 採血管(紫頭)。
3. 血液檢體採集後，務必將 EDTA 採血管上下翻轉，使血液與 EDTA 抗凝劑充份混合，混合均勻後冷藏保存。
4. 檢體請儘速送回實驗室。

報告天數

7 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有