

# 0991 毒性元素分析採檢須知(頭髮)

## Toxic Element Analysis (Hair)

### 請注意!

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

### 檢體

頭髮 0.25 公克

### 採檢所需物品

1 個 頭髮收集袋(含磅秤紙)

### 採檢注意事項

1. 避免採集抹上髮油、髮雕、或定型液的頭髮及染色過的頭髮。
2. 若近兩個月曾經染、燙髮，請加以註明。
3. 收集前一天請使用中性洗髮精(如嬌生嬰兒洗髮精)洗頭髮。

### 頭髮採檢法

1. 請於檢驗申請單與頭髮收集袋上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。
2. 收集前一天最好使用嬌生嬰兒洗髮精洗頭髮。
3. 用不銹鋼剪刀取後腦勺**近頭皮髮根部**頭髮多處，約 3 公分長即可。
4. 將剪下的頭髮置於秤藥紙上秤重，頭髮請取足 0.25 公克以上。
5. 將頭髮檢體至於收集袋內，封好封口，速送回實驗室。



### 報告天數

10 天