

1068 停經前荷爾蒙健康評估採檢須知

Premenopausal Hormone-META[®]

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

紅頭 8ml x 1 支(血清)，冷藏

採檢注意事項

1. 採血前若有服用任何藥物(特別是荷爾蒙類)，需提前與醫師討論。
2. 請於檢驗申請單上註明**平均月經天數**、**最後月經日期(LMP)**、與**採檢日期**。
3. 月經週期 28 天者，建議在月經週期第 19-23 天之間(黃體中期)抽血。月經週期 30 天者，則在第 21-25 天抽血，以此類推。
4. 血液請置於 **4℃冷藏**保存。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，1 支生化採血管(紅頭)。
3. 生化採血管(紅頭)於室溫下放置 30 分鐘，待完全凝固後 4℃冷藏保存。
4. 檢體請儘速送回實驗室。

報告天數

7 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有