

1069 停經後荷爾蒙評估採檢須知

Postmenopausal Hormone-META[®]

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

紅頭 8ml x1 支(血清)，冷藏

採檢注意事項

1. 採血前若有服用任何藥物(特別是荷爾蒙類)，需提前與醫師討論。
2. 請於檢驗申請單上註明**停經時年齡**。
3. 血液請置於 **4°C 冷藏**保存。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，1 支生化採血管(紅頭)。
3. 生化採血管(紅頭)於室溫下放置 30 分鐘，待完全凝固後 4°C 冷藏保存。
4. 檢體請儘速送回實驗室。

報告天數

7 天

