

1075 腸道菌相失衡分析採檢須知

Dysbiosis-META[®]

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

避光尿液(含防腐劑) 10 ml x 1 支，冷凍

採檢所需物品

- 1 個 尿液收集杯
- 1 個 尿液收集瓶
- 1 支 避光尿液試管，含防腐劑**
- 1 支 吸管
- 1 個 夾鏈袋
- 1 份 採檢說明書

採檢注意事項

1. 腎功能異常或使用利尿劑可能影響測試結果。此外，某些藥物可能會影響測試結果，如 cephalosporins(Cefoxitin) 、 cimetidine(Tagamet) 、 fibrates(Ciprofibrate) 、 和 trimethoprim-sulfamethoxazole (Bactrim)。若您有服用以上的藥物請諮詢您的醫師，切勿自行變更藥物使用方式。
2. 檢測前 4 天，避免補充非必需之維生素、礦物質、胺基酸、與草藥等營養品(除非您的醫生有指示)，包括運動飲料、能量飲料。
3. 檢測前 2 天，停止補充含肌酸(creatine)、 α -酮戊二酸(alpha- ketoglutarate)、蘋果酸之營養品。避免攝取過量水果、牛奶和其他乳製品。
4. 檢測前 1 天，避免進食或飲用含有阿斯巴甜、味精(MSG)的食品，並避免過度攝取單一食物。採用一般飲食即可。
5. 女性請勿在月經週期內採檢。
6. 採檢前一日睡前飲水勿超過 250ml，避免尿液被稀釋。
7. 睡前請先將尿液排空，收集早晨起床後第一次尿液(約經過 6-8 小時的睡眠)，將尿液收集於尿液收集杯中。
8. 若有夜尿習慣者，請收集於尿液收集瓶中，等收集完起床後第一次尿液，混合均勻後再取至尿液試管中。
9. 取 10ml 尿液倒至含防腐劑避光尿管中，混合均勻並栓緊上蓋。
10. **尿液請置於 2~8℃ 冷藏保存(若 3 日內無法送達實驗室，則置於冷凍保存)。**



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有

尿液採檢法



1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。尿液試管上填妥姓名及採檢日期。

2. 採檢前一晚入睡前請先將尿液排空。



3. 收集早晨起床後第一次尿液(約經過 6-8 小時的睡眠)，將尿液收集於尿液收集杯中。

4. 若有夜尿習慣者，同樣請收集於尿液收集瓶中，等收集完起床後第一次尿液，混合均勻後，再取至避光尿液試管中。

5. 以吸管吸取尿液至避光尿液試管中，裝約 8 分滿並栓緊蓋子。剩餘的尿液即可丟棄。



6. 將收集好的避光尿液試管放入夾鏈袋中，並再次確認檢驗申請單與尿液試管上是否填妥基本資料，盡速送回醫師處，否則需置於冷凍庫保存（若 3 日內可送達實驗室則 4℃ 保存）。

報告天數

10 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有