

# 1111 類風濕性關節炎指標採檢須知

## Rheumatoid Arthritis Biomarker

### 請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

### 檢體

紅頭 8ml x 1 支(血清)，冷藏

### 採檢注意事項

1. 採血前若有服用任何藥物，需提前與醫師討論。
2. 如有服用抗組織胺類藥物，檢測前須停藥 2 週以上。
3. 如有服用類固醇類藥物或免疫抑制劑，需提前與醫師討論，檢測前須停藥 4 週以上。
4. 血液請**抽滿**試管，置於 **4°C 冷藏**保存。

### 血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，1 支生化採血管(紅頭)，請**抽滿**試管。
3. 生化採血管(紅頭)於室溫下放置 30 分鐘，待完全凝固後 4°C 冷藏保存。
4. 檢體請儘速送回實驗室。

### 報告天數

7 天