

1170 神經傳導物代謝評估採檢須知

Neurotransmitter-META[®]

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

抗凍尿液管 3ml x 1 支，冷凍(含試紙)

採檢所需物品

1 個 尿液收集杯
1 支 抗凍尿液試管(內含試紙)
1 支 吸管
1 份 採檢說明書

採檢注意事項

1. 尿液檢體收集前勿飲用任何含咖啡因飲料(如：咖啡、茶、可樂等)。
2. 檢體採集前切勿做激烈運動，包含有氧運動或會使心跳加速的運動。
3. **尿液檢體應在起床後 2-3 小時收集(早晨第二次尿液)，約在早上 8-10 點左右。**
4. 採檢前勿過量飲水，起床後飲水不超過 250ml，避免尿液被稀釋。
5. 試管中含有一張試紙，請勿丟棄或抽出，直接將尿液裝入即可。

尿液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。尿液試管上填妥姓名及採檢日期。
2. 收集早晨**第二次尿液**(中段尿)，將尿液收集於尿液收集杯中。
3. 請勿將試管中試紙抽出，直接以吸管吸取尿液至尿液試管中，裝約 8 分滿(不可裝滿)並栓緊蓋子。剩餘的尿液即可丟棄。
4. 檢體請冷凍保存，並盡快送回醫師處。

報告天數

10 天