

1295 全套生理年齡評估採檢須知

TruAge COMPLETE

1296 基礎生理年齡評估採檢須知

TruAge PACE

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於有效期限內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。採檢管隨檢驗單一併交回，由實驗室人員協助填寫客戶相關資料。

檢體

紫頭 3mlx1 支(全血), 冷藏

採檢注意事項

1. 生理年齡檢測需填寫一份有關生活型態、家族病史的問卷，送檢時請與檢體一併交回。
2. 血液檢體請置於 4°C 冷藏保存，不可冷凍。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。
2. 抽取血液檢體，抽取一支 EDTA 採血管(紫頭)。
3. 血液檢體採集後，務必將 EDTA 採血管上下翻轉，使血液與 EDTA 抗凝劑充份混合，混合均勻後冷藏保存。
4. 檢體請儘速送回實驗室。

報告天數

30 天