

1348 隱吡咯分析採檢須知

Kryptopyrrole Analysis

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

避光二次尿液 10ml x 1 支，冷凍

藍蓋二次尿液 5ml x 1 支，冷凍

採檢所需物品

- 1 個 尿液收集杯
- 1 支 **專用避光尿液試管(含保存粉劑)**
- 1 支 藍蓋尿管
- 1 份 吸管
- 1 支 採檢說明書

採檢注意事項

1. **採集早晨第二次尿液**。請於晨尿後 2-3 小時，留取第二次尿。
2. 採檢前一晚勿過量飲水，起床後飲水不超過 250ml，避免尿液被稀釋。
3. 女性請勿在月經週期內採檢。
4. 避光試管中含粉末狀保存劑，留檢時請務必將尿液與保存劑混合均勻。

尿液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。尿液試管上填妥姓名及採檢日期。
2. 收集早晨**第二次尿液**(中段尿)，將尿液收集於尿液收集杯中。
 - **避光尿管採檢方式：**
以吸管吸取尿液至避光尿液試管，裝約 8 分滿(不可裝滿)並栓緊蓋子。務必將避光管中尿液與保存劑混合均勻，維持檢體的穩定度。
 - **藍蓋尿管採檢方式：**
於集尿杯中吸取檢體分裝至藍蓋尿管中，栓緊上蓋。**請勿用避光尿管內的檢體分裝。**
3. 檢體請冷凍保存，並盡快送回醫師處。

報告天數

7 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202411 版權所有