

1357 黴菌毒素分析採檢須知

MycoTox-META[®]

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

尿液 5ml x 1 支，冷藏

採檢所需物品

1 個 尿液收集杯
1 支 藍蓋尿液試管
1 支 塑膠吸管
1 份 採檢說明書

採檢注意事項

1. 留取**早晨第一次**尿。採檢前一日睡前飲水勿超過 250ml，避免尿液被稀釋。
2. 檢體收集前三天盡量避免食用水果(蘋果、梨子、葡萄、莓果類)及海鮮(如魚類、貝類)食物，避免檢測數據受干擾。
3. 若有使用頭孢菌素類抗生素(如 Cephalexin)，請停藥一週後再留檢。
4. 女性請避開月經週期採檢。

尿液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及生日。尿液試管上填妥姓名。
2. 吸取 5ml 尿液至藍蓋尿液管，剩餘的尿液即可丟棄。檢體請置於 2-8℃ 冷藏保存。
3. 檢體請於採檢完三日內送回實驗室。

報告天數

10 天



瀚仕功能醫學研究中心
REDOX Functional Medicine Laboratory

R202505 版權所有