

# 1400 慢性食物敏感 IgG<sub>4</sub> 分析-22 採檢須知

## Chronic Food Sensitivity IgG<sub>4</sub> Analysis-22

### 請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

### 檢體

---

紅頭 8ml x 1 支(血清)，冷藏

### 採檢注意事項

---

1. 抗組織胺、類固醇藥物、免疫抑制劑可能會影響檢測數據。如您有服用相關藥物，需提前與醫師討論是否停藥。
2. 各項藥物之藥性不同、半衰期亦有差異，停藥週期請遵循醫師指示。
3. 血液請置於 **4°C 冷藏** 保存。

### 血液採檢法

---

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，1 支生化採血管(紅頭)。
3. 生化採血管(紅頭)於室溫下放置 30 分鐘，待完全凝固後 4°C 冷藏保存。
4. 檢體請儘速送回實驗室。

### 報告天數

---

7 天