

# 1436 脂肪酸分析(細胞膜)採檢須知

## Fatty Acid-META<sup>®</sup>

### 請注意!

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

### 檢體

---

紫頭 3ml x 1 支(全血)，冷藏

### 採檢注意事項

---

1. 血液檢體置於冷藏保存，絕不可冷凍。
2. 採血前若有服用任何藥物，需提前與醫師討論。
3. 採血前若有服用營養補充品(如魚油)，需提前與醫師討論。

### 血液採檢法

---

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日，採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，抽取 1 支 EDTA 採血管(紫頭)。
3. 1 支 EDTA 採血管(紫頭)檢體採集後，輕輕上下翻轉 10 次，待血液與抗凝劑混合均勻後 4°C 冷藏保存。
4. 檢體儘速送回實驗室。

### 報告天數

---

10 天