

1439 甲基化循環基因分析採檢須知

Methyl Genomics®

請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

檢體

紫頭 3ml x 1 支

採檢注意事項

1. 血液檢體:請於 **4°C 冷藏保存**，絕不可冷凍。
2. 檢體儘速送回實驗室。

血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體，抽取一支 EDTA 採血管(紫頭)。
3. 血液檢體採集後，務必將 EDTA 採血管上下翻轉，使血液與 EDTA 抗凝劑充份混合，混合均勻後冷藏(4°C)保存。
4. 檢體儘速送回實驗室。

報告天數

21 天